




neodisher® FA

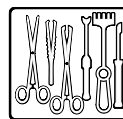

Alkaliskt rengöringsmedel för maskinell behandling av termostabila och termolabila instrument



Flytande koncentrat

Användningsområde:

- Maskinell rengöring av kirurgiska instrument, anesthesiutrustning, kirurgiska skor och annan medicinteknisk utrustning samt nappflaskor på sjukhus och läkarmottagningar
- Maskinell rengöring av laboratorieglas i medicinska laboratorier

Effektspektrum:

- Mångsidigt
- God rengöringsförmåga för blod, protein, rester av odlingsmedium och gelatin
- Lämpligt för kirurgiska instrument, anesthesiutrustning, laboratorieglas och plast
- Anodiserat aluminium måste testas i förväg för lämplighet
- Titan och titanlegeringar kan genomgå en färgförändring på grund av en förändring i tjockleken på det färggivande titanoxidskiktet
- Kan användas med alla vattenhårdheter

Särskilda egenskaper:

- Med högt materialskydd
- Fritt från oxidationsmedel och tensider

Användning och dosering:

neodisher FA används i rengörings- och desinfektionsapparater för instrument. Doseringen beror bland annat på diskgodsets nedsmutsningsgrad och är 2–4 ml/l.

Lämpliga doseringsapparater måste användas för dosering.

Användningsexempel:

Maskinell behandling av kirurgiska instrument och anesthesiutrustning med termisk desinfektion:	
Rengöring med neodisher FA	2–4 ml/l
Neutralisering med neodisher Z eller neodisher N	1–2 ml
Eftersköljning med neodisher MediKlar	0,3–1 ml/l
Avlägsnande av blod, serum, odlingsmedia och analysrester i medicinska och analytiska laboratorier:	
Rengöring med neodisher FA	2–4 ml/l
Neutralisering med neodisher Z eller neodisher N	1–2 ml/l
Rengöring av nappflaskor i mejerikök:	
Rengöring med neodisher FA	2–4 ml/l
Neutralisering med neodisher Z	1–2 ml/l

För att undvika vattenfläckar rekommenderas användning av helt avmineraliserat vatten i den sista sköljningen. Samtidigt skyddas det anodiserade aluminiumet.

Allmän information om användning:

- neodisher FA-appliceringslösningen måste sköljas av helt med vatten (helst avmineraliserat).
- Endast för kommersiella tillämpningar.
- Får inte blandas med andra produkter.
- Spola doseringssystemet inklusive sugslangarna med vatten innan du byter produkt.



- Behandlingen måste utföras i enlighet med lagstiftningen om medicintekniska produkter och tillämpliga föreskrifter med hjälp av lämpliga validerade förfaranden.
- Följ rekommendationerna för behandling från tillverkaren av den medicintekniska produkten i enlighet med kraven i DIN EN ISO 17664.
- Bruksanvisningarna från tillverkarna av rengörings- och desinfektionsapparaterna måste följas.

Faro- och säkerhetsanvisningar:

Säkerhets- samt miljöinformation finns i säkerhetsdatabladet. Dessa finns tillgängliga på www.drweigert.de i avsnittet "Service/nedladdningar".

Kassera endast tomma och förslutna behållare. Bortskaffande av rester av fyllnadsmaterial: Se säkerhetsdatabladet.

MB 4101/3-1 Version 11/2020

Tekniska data:

pH-värde	11,6–11,8 (2–4 ml/l, bestämt i helt avmineraliserat vatten, 20 °C)
Viskositet	< 50 mPa s (koncentrat, 20 °C)
Densitet	ca 1,5 g/cm ³ (20 °C)
Titreringsfaktor	0,65 (enligt titreringsanvisning från neodisher)

Ingredienser:

Ingredienser för rengöringsmedel enligt EG:s tvätt- och rengöringsmedelsförordning 648/2004:
15–30 % fosfater

CE-märkning:

neodisher FA uppfyller de krav som följer av europeisk lagstiftning om medicintekniska produkter.

Om ett allvarligt tillbud inträffar med denna produkt måste det rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten.

Förvarningsanvisningar:

Känslig för frost från -15 °C. En temperatur mellan -15 och 30 °C måste hållas under förvaringen. Kan lagras i 3 år om det förvaras på rätt sätt. Kan användas tills: Se märkning på etiketten bakom symbolen .