




neodisher[®] N



Surt rengörings- och neutraliseringsmedel för maskinell behandling av instrument, laboratorieglas och djurburar

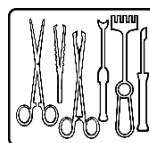

Flytande koncentrat

Användningsområde:

- Neutralisering av alkaliska rester vid maskinell rengöring av kirurgiska instrument, anestesiutrustning, behållare, kirurgiska skor och nappflaskor samt annan medicinteknisk utrustning
- Neutralisering av alkaliska rester vid maskinell rengöring av laboratorieglas
- Mekanisk sur förrengöring eller rengöring av laboratorieglas
- Maskinell sur rengöring av djurburar

Effektspektrum:

- Avlägsnar missfärgningar, kalkavlagringar, urinsten och annan syralöslig smuts
- Lämpligt för föremål av glas, keramiskt material, rostfritt stål, syrafast plast och gummidmaterial
- Ej lämpligt för icke-järnmetaller, förkromade och förnicklade delar samt anodiserat aluminium

Särskilda egenskaper:

- Mycket god avspolningsbarhet
- Fritt från tensider

Användning och dosering:

neodisher N används i rengörings- och desinfektionsapparater för neutralisering samt för förrengöring och rengöring. Doseringen beror bl.a. på användningsområdet. Följande parametrar måste följas vid användning av neodisher N:

Neutralisering under maskinell behandling av termostabila och termolabila instrument och annan medicinteknisk utrustning samt laboratorieglas	1–2 ml/l
Mekanisk sur förrengöring eller rengöring av laboratorieglas	2–4 ml/l 40–60 °C
Maskinell sur rengöring av djurburar	3–4 ml/l 60–80 °C

Lämpliga doseringsapparater måste användas för dosering.

För att undvika vattenfläckar rekommenderas användning av helt avmineraliserat vatten i den sista sköljningen.

neodisher N-appliceringslösningen måste sköljas av helt med vatten (helst avmineraliserat).

Se när du använder neodisher TP för förrengöring eller rengöring till att diskgodset, rengörings- och desinfektionsapparaten och avloppsledningarna är syrafasta. Avloppsrör av eternit och gjutjärn är olämpliga och kräver föregående neutralisering av avloppslösningen.

Allmän information om användning:

- Endast för kommersiella tillämpningar.
- Får inte blandas med andra produkter.
- Spola doseringssystemet inklusive sugslangarna med vatten innan du byter produkt.
- Behandlingen måste utföras i enlighet med lagstiftningen om medicintekniska produkter och tillämpliga föreskrifter med hjälp av lämpliga validerade förfaranden.



- Följ rekommendationerna för behandling från tillverkaren av den medicintekniska produkten i enlighet med kraven i DIN EN ISO 17664, rekommendationerna för rengöring från tillverkaren av laboratorieglassamt rekommendationerna för behandling från tillverkaren av djurburar och rekommendationerna från arbetsgruppen för behandling av burar (AK KAB) i den aktuella utgåvan av AK-KAB-broschyren "Rätt utförd rengöring av burar inom djurhållning".
- Bruksanvisningarna från tillverkarna av rengörings- och desinfektionsapparaterna måste följas.

Faro- och säkerhetsanvisningar:

Säkerhets- samt miljöinformation finns i säkerhetsdatabladet. Dessa finns tillgängliga på www.drweigert.de i avsnittet "Service/nedladdningar".

Kassera endast tomma och förslutna behållare. Bortskaffande av rester av fyllnadsmaterial: Se säkerhetsdatabladet.

MB 4201/3-1 Version 03/2020

Tekniska data:

pH-värde	2,2–1,8 (1–4 ml/l, bestämt i helt avmineraliserat vatten, 20 °C)
Viskositet	< 50 mPa s (koncentrat, 20 °C)
Densitet	ca 1,5 g/cm ³ (20 °C)
Titreringsfaktor	0,16 (enligt titreringsanvisning från neodisher)

Ingredienser:

Ingredienser för rengöringsmedel enligt EG:s tvätt- och rengöringsmedelsförordning 648/2004:
> 30 % fosfater

CE-märkning:

neodisher N uppfyller de krav som följer av europeisk lagstiftning om medicintekniska produkter.

Om ett allvarligt tillbud inträffar med denna produkt måste det rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten.

Förvarningsanvisningar:

En temperatur på mellan -15 och 30 °C måste hållas under förvaringen. Kan lagras i 3 år om det förvaras på rätt sätt. Kan användas tills:
Se märkning på etiketten bakom symbolen .