



neodisher[®] SBR extra



Rengöringsmedel för användning i rengörings- och desinfektionsapparater för bäcken



Flytande koncentrat

Användningsområde:

- Rengöring av bäcken och urinflaskor i rengörings- och desinfektionsapparater för bäcken

Effektspektrum:

- Tar bort även envis smuts som kalktvålränder och cytostatikarester från mänskliga utsöndringar

Särskilda egenskaper:

- Lågskummande inställning
- Kan användas med alla vattenhårdheter
- Kan även användas för kalkbindning och eftersköljning i lämpliga rengörings- och desinfektionsapparater för bäcken

Användning och dosering:

neodisher SBR extra kan användas i rengörings- och desinfektionsapparater för bäcken som är försedda med en doseringspump för rengöringsmedel. Doseringsmängden är 1–3 ml/l beroende på vattnets hårdhet och graden av nedsmutsning i rengöringssteget.

Allmän information om användning:

- Endast för kommersiella tillämpningar.
- Spola doseringssystemet inkl. sugslangarna med vatten innan du byter produkt.
- neodisher SBR extra-appliceringslösningen måste sköljas av helt med vatten.
- Behandlingen måste utföras i enlighet med lagstiftningen om medicintekniska produkter och tillämpliga föreskrifter med hjälp av lämpliga validerade förfaranden.

- Följ rekommendationerna för behandling från tillverkaren av den medicintekniska produkten i enlighet med kraven i DIN EN ISO 17664.
- Bruksanvisningar från tillverkarna av rengörings- och desinfektionsapparaterna måste följas.
- Får inte blandas med andra produkter.

Tekniska data:

pH-värde	11,2–11,5 (1–3 ml/l, bestämt i helt avmineraliserat vatten, 20 °C)
Viskositet	< 50 mPa s (koncentrat, 20 °C)
Densitet	ca 1,2 g/cm ³ (20 °C)

Ingredienser:

Ingredienser för rengöringsmedel enligt EG:s tvätt- och rengöringsmedelsförordning 648/2004:

< 5 % fosfonater

15–30 % EDTA

CE-märkning:

neodisher SBR extra uppfyller de krav som följer av europeisk lagstiftning om medicintekniska produkter.

Om ett allvarligt tillbud inträffar med denna produkt måste det rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten.

Förvarningsanvisningar:

En temperatur på mellan 0 och 30 °C måste hållas under förvaringen. Kan användas i 3 år om den förvaras på rätt sätt. Kan användas tills: Se märkning på etiketten bakom symbolen .



neodisher® SBR extra

Faro- och säkerhetsanvisningar:

Säkerhets- och miljöinformation finns i säkerhetsdatabladet. Dessa finns tillgängliga på www.drweigert.de i avsnittet "Service/nedladdningar".

Kassera endast tomma och förslutna behållare.
Bortskaffande av rester av fyllnadsmaterial: Se säkerhetsdatabladet.

MB 4007/3-2 Version 10/2021

Informationen i detta informationsblad är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Den befriar inte användaren från att utföra egna tester och provningar.
En juridiskt bindande försäkran om vissa egenskaper kan inte härledas från denna information.
